

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Shot Cover

穿刺部被覆保護材 / ショットカバー


滅菌済医療機器



厚手パッドにより、圧迫力を高めた止血絆です。



*イラストはイメージです。

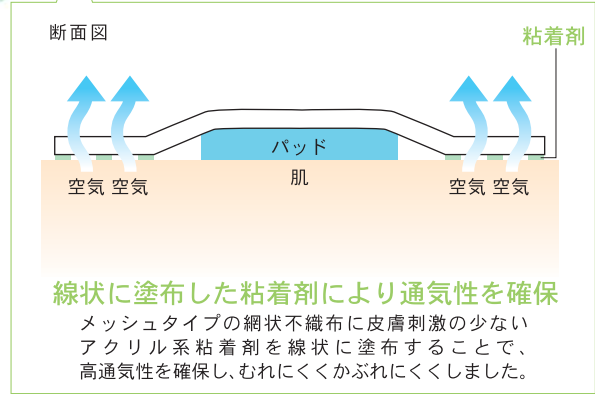

適度な圧迫力と吸収力を実現する厚手パッド

厚さ2mmのパッドを採用することで、血液等をしっかり吸収し、十分な圧迫力で止血効果を高めました。

注射針の大きさ(ゲージ)の目安表

注射針の大きさ(ゲージ)	27	26	25	24	23	22	21
ミリオンエイド® ショットカバー			←————→				


使用方法



剥離紙を剥がす
剥離紙の片側を剥がします。



創傷面にパッドを当てる
パッドを部位にあて、もう一方の剥離紙を剥がします。

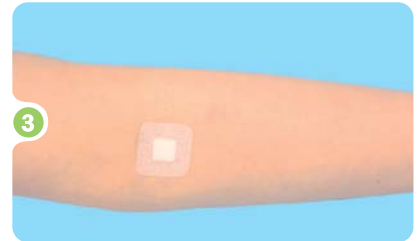

しっかり固定
そのままテープを押さえてしっかりと固定してください。

■使用上の注意

●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●粘着部を穿刺部に貼らないでください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●滅菌効果が損なわれますので、テープは使用時に開封してください。●包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光があたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	内装[メーカーコード 4971620]			外装[メーカーコード 14971620]	
				入数	標準希望小売価格	JAN	入数	GTIN
30mm×30mm	12mm×12mm	白	MC-COV-1	240袋	2,000円	875100	40箱	875107

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所：札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所：熊本

お問い合わせ先
メディカルグループまで

大阪 TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京 TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845

XJ010 11.06-5.000 第2版