

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Sanfty Pads S

創傷部被覆保護ドレッシング／サンフティパッド S


滅菌済医療機器



刺激が少なく、血液や滲出液を素早く吸収する、 皮膚に優しい創傷保護パッドです。

特長

- パッドはレーヨン不織布にポリエチレンのネットをラミ加工しており、創傷部への固着を防止します。また、血液や滲出液の吸収に優れています。
- 網状不織布で粘着剤を線状に塗布しており、高通気性を確保しています。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- 1枚ずつE.O.G滅菌包装しています。

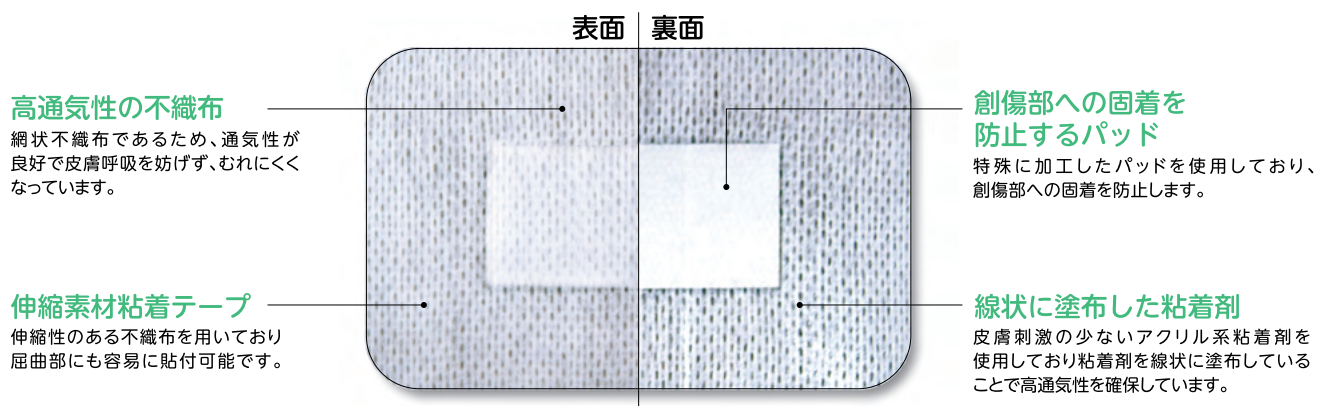

使用方法

※No.4050は貼り方が異なります。使用上の注意をよく読んでご使用ください。



1

裏面の剥離紙の大きい方をゆっくり剥がしてください。



2

パッド部を創傷面に貼ってください。



3

残りの剥離紙をゆっくり剥ぎとってください。



4

パッド部を押さえ、確実に貼り付けてください。

■使用上の注意


- 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。
- 皮膚の弱い方は同じ所に繰り返し貼らずに1日1～2回粘着面の位置を変えてください。
- パッド部が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼り替えてください。
- 粘着面を患部に貼らないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- 救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用ください。
- 滅菌効果が損なわれますので滅菌袋は使用時に開封してください。
- 包装が破損または汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■保管方法

- 直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

規格	粘着部サイズ	パッド部サイズ	品名コード	内装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
				標準希望小売価格	入数	JAN	入数	GTIN
No.4050	40mm×50mm	20mm×30mm	YB-G4050S	1,310円	50枚	875261	20箱	875268
No.6070	60mm×70mm	30mm×40mm	YB-G6070S	1,365円	50枚	875278	20箱	875275
No.6090	60mm×90mm	30mm×60mm	YB-G6090S	1,575円	50枚	875285	20箱	875282
No.8010	80mm×100mm	40mm×70mm	YB-G80100S	1,470円	30枚	875292	20箱	875299
No.10135	100mm×135mm	50mm×90mm	YB-G10135S	2,310円	30枚	875308	20箱	875305

※標準希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

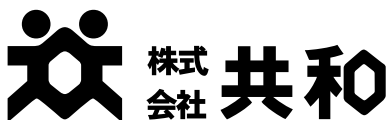

www.kvowa-ltd.co.jp
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101

東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

ZZ030 23,04-1,000 第3版