

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Shot Cover

穿刺部被覆保護材 / ショットカバー

滅菌済医療機器



厚手パッドにより、圧迫力を高めた止血絆です。




*イラストはイメージです。

適度な圧迫力と吸収力を実現する厚手パッド

厚さ2mmのパッドを採用することで、血液等をしっかり吸収し、十分な圧迫力で止血効果を高めました。

断面図

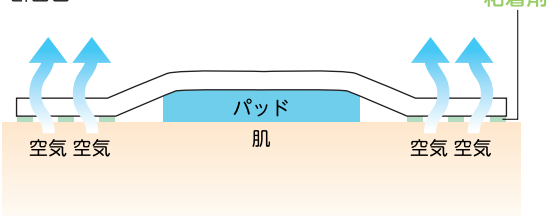

線状に塗布した粘着剤により通気性を確保

メッシュタイプの網状不織布に皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を線状に塗布することで、高通気性を確保し、むれにくくかぶれにくくしました。

注射針の大きさ(ゲージ)の目安表

注射針の大きさ(ゲージ)	27	26	25	24	23	22	21
ミリオンエイド® ショットカバー							

使用方法




剥離紙を剥がす

剥離紙の片側を剥がします。



創傷面にパッドを当てる

パッドを部位にあて、もう一方の剥離紙を剥がします。

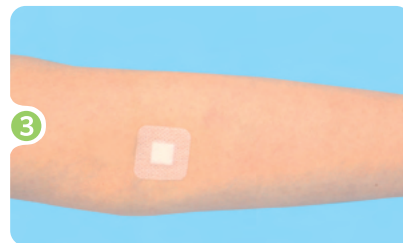

しっかり固定

そのままテープを押さえてしっかりと固定してください。

■使用上の注意

●使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるときにくい場合があります。●粘着部を穿刺部に貼らないでください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●滅菌効果が損なわれますので、テープは使用時に開封してください。●包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	個装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
				入数	標準希望小売価格	JAN	入数	GTIN
30mm×30mm	12mm×12mm	白	MC-COV-1	240袋	2,200円	875100	40箱	875107

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



www.kyowa-ltd.co.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101

東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

XJ010 23.04-1,000 第5版