

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Shot Press

穿刺部被覆保護材 / ショットプレス

滅菌済医療機器



処置が簡単で、穿刺部をほどよく圧迫。 止血効果が期待できます。

特長

- 貼付後、手で押さえたり曲げたりすることなく圧迫でき、しっかりと止血できます。
- 衣服に擦れてもしっかり密着しており、採血患者へ安心感をもたらします。
- シート裏面に固定用テープが付いていることで、治療台の端に固定でき、片手で簡単に処置できます。
- 1袋づつE.O.G滅菌包装しています。

固定用シール


シート裏面にシールが付いており治療台、診療台等に固定できます。

布素材粘着テープ

伸縮性のある布素材を用いており止血に必要な圧迫ができます。

5連仕様

作業効率を上げるために、5枚で1シートにしています。

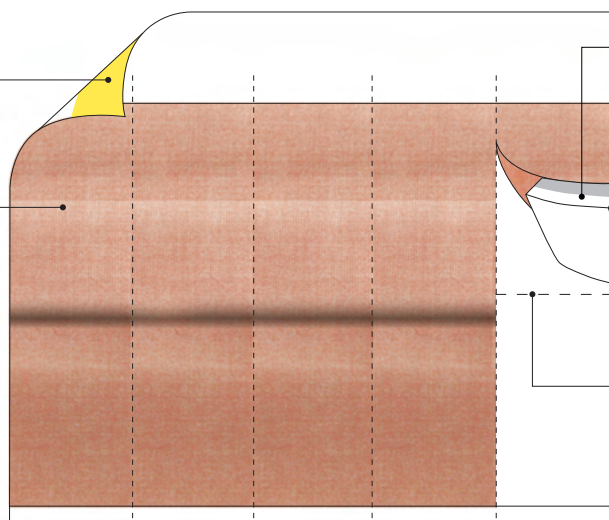

2層パッド

2層構造なので、ほどよい圧迫と優れた吸水性を有します。

ミシン目入りセパレーター

ミシン目から切り離す形状なので、簡単に貼付可能です。


注射針の大きさ(ゲージ)の目安表

注射針の大きさ(ゲージ)	27	26	25	24	23	22	21
ミリオンエイド® ショットプレス						←	→

使用方法



固定シールを剥がす
シート裏面の固定用テープの剥離紙を剥がします。

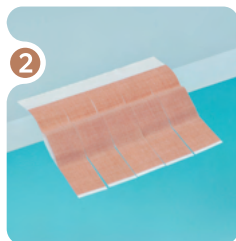

治療台に固定
治療台に固定します。



引っ張り切り離す
パッド部分を水平に引っ張り、切り離します。



押さえながら抜針する
軽く押さえながら注射針を抜いてください。



しっかり固定
残りの剥離紙を剥がし、しっかりと固定してください。

■使用上の注意

●傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●粘着部を穿刺部に貼らないでください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。●包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	個装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
				標準希望小売価格	入数	JAN	入数	GTIN
20mm×70mm	20mm×15mm	ベージュ	MC-PRESS-1	11,000円	25袋 (500回分)	848074	10箱	848071

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



www.kyowa-ltd.co.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

☎ お問い合わせ先

メディカルグループまで
大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101
東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

XJ001 23.04-1,000 第8版