

1000000 Million Aid / ミリオンエイト®

Fil-fix 20

滅菌済・透明フィルムドレッシング／フィルフィックス 20

滅菌済医療機器



観察に便利な、滅菌済・透明フィルムドレッシング

特長

- 観察しやすい透明フィルムです。
- 手袋をつけたままでも扱いやすい持ち手付きです。

持ち手付きで扱いやすいので、手袋をしていても両手で貼れます。

表のフィルムは
やわらかい素材なので、
肌に密着させやすいです。

フィルムが透明なので、穿
刺部や創部を直接観察で
きます。


しっかり貼りつく防水フィルムが、穿
刺部や創部を細菌や水の侵入
から守ります。

使用方法

再使用禁止



① 中央の大きい剥離紙をはがします。

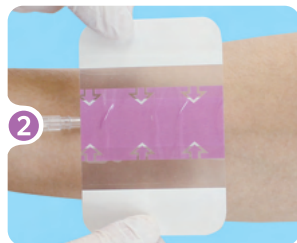

② テープの両端を持って、穿刺部・創部
がテープの中央に来るように合わせ
て貼ります。



③ 両端の小さい剥離紙をはがし、
フィルムが大きく浮かないよう端ま
で貼ります。



④ いずれかの矢印の方向に、表の
フィルムをはがします。



⑤ もう一方の表のフィルムもはがし
ます。



⑥ 穿刺部・創部の周りを押さえ、テープ
をしっかり密着させます。

はがし方



フィルムの端を持ち、皮膚と平行に
引っ張りながら、ゆっくりとはがし
ます。

■使用上の注意


● 穿刺部から滲出液や出血が見られる場合には使用しないでください。● 明らかに感染を有している部位には使用しないでください。● 穿刺部とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるときに貼る場合があります。● 貼付部位は感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。● 本品の使用により、感染症及び皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。● 救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。● 皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。● 滅菌効果が損なわれますので、包装袋は使用時に開封してください。● 包装が破損及び汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。● 剥がす際は、皮膚障害やカテーテルの抜去を防ぐため、皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくり剥がしてください。

■保管方法

● 直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所で保管してください。● 小児の手の届かない所に保管してください。

規格	サイズ	品名コード	個装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
			標準希望小売価格	入数	JAN	入数	GTIN
No.6070	60mm×70mm	YB-256070	7,350円	100枚	860786	10箱	860783
No.6090	60mm×90mm	YB-256090	9,450円	100枚	860779	10箱	860776
No.8010	80mm×100mm	YB-258010	7,140円	50枚	860755	10箱	860752
No.1012	100mm×120mm	YB-251012	9,870円	50枚	860762	10箱	860769

※標準希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

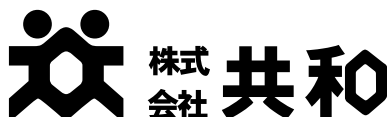

www.kyowa-ltd.co.jp
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

☎お問い合わせ先

メディカルグループまで
大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101
東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

ZZ019 23,04-1,000 第4版