

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Adhesive Pads

創傷部被覆保護ドレッシング／粘着パッド


滅菌済医療機器




高い吸収性パッドを使用し、撥水機能を有した皮膚に優しい粘着パッドです。

特 長

- ポリネットで包んだパッドを使用しており、創傷部への固着を防止します。
また、血液や滲出液の吸収に優れています。
- 粘着剤を線状に塗布しており、高通気性を確保しています。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- 撥水作用のある不織布を基材としています。
- 1枚ずつE.O.G滅菌包装しています。

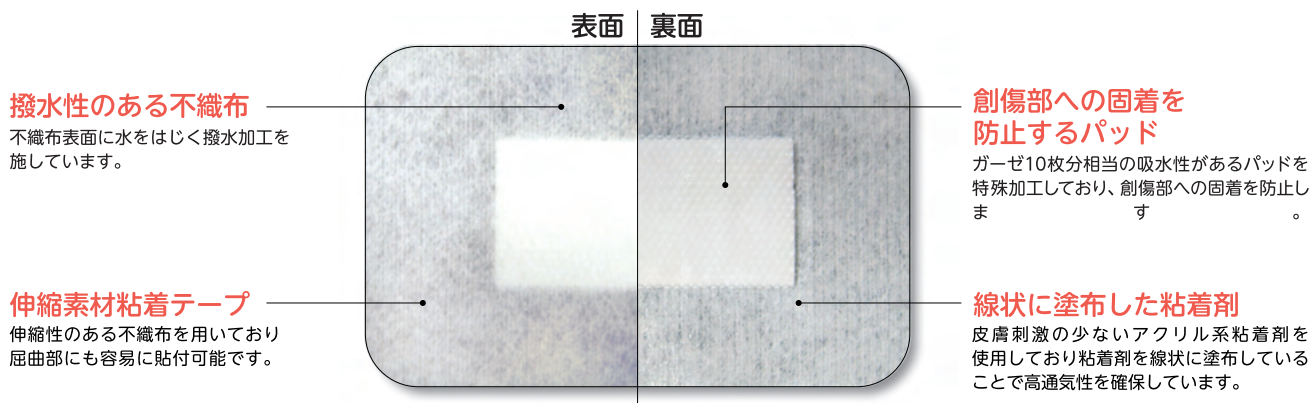

使用方法

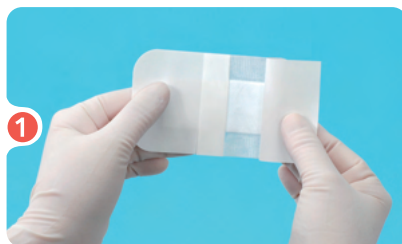

剥離紙を剥がす

裏面の剥離紙の大きい方をゆっくり剥がしてください。



創傷面にパッドを当てる

パッド部分を創傷面に貼付しながら、残りの剥離紙をゆっくり剥ぎとってください。



しっかり固定

パッド部を押さえ確実に貼付してください。

■使用上の注意

●傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●皮膚の弱い方は同じ所に繰り返し貼らずに1日1～2回粘着面の位置を変えてください。●パッド部が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼り替えてください。●粘着面を患部に貼らないでください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用ください。●滅菌効果が損なわれますので滅菌袋は使用時に開封してください。●包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

規格	粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	内装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
					標準希望小売価格	入数	JAN	入数	GTIN
No.50	50mm×80mm	20mm×40mm	白	YB-G5080	1,760円	50枚	846056	20箱	846053
No.60	60mm×100mm	30mm×60mm	白	YB-G60100	1,980円	50枚	846063	20箱	846060
No.80	80mm×130mm	40mm×90mm	白	YB-G80130	1,870円	30枚	846087	20箱	846084
No.100	100mm×160mm	50mm×100mm	白	YB-G100160	2,970円	30枚	846100	20箱	846107
No.110	110mm×200mm	50mm×150mm	白	YB-G110200	2,420円	20枚	846117	10箱	846114
No.120	120mm×260mm	60mm×200mm	白	YB-G120260	3,520円	20枚	846124	10箱	846121

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



www.kyowa-ltd.co.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28
東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

☎ お問い合わせ先
メディカルグループまで
大 阪 TEL : 06-6658-8217
FAX : 06-6658-8101
東 京 TEL : 03-5634-3843
FAX : 03-5634-3845

XJ003 23.04-1,000 第5版